


So funktioniert das Herstellen des nBrace Tape Measure

1. Kontrolle der Skalensegmente, sie müssen genau 5cm lang sein (nach dem Ausdruck können sich Abweichungen ergeben)
2. die 5 Einzel-Grafiken ausschneiden
3. die mit „kleben“ gekennzeichneten Felder mit einem Papierkleber bestreichen
4. eines der Schwarzen nBrace Felder aufkleben bis alle Einzelteile miteinander das 100cm lange Mess-Tool ergeben.
5. den Punkt C7 mit doppelseitigem Klebeband oder Hautkleber genau an C7 fixieren.

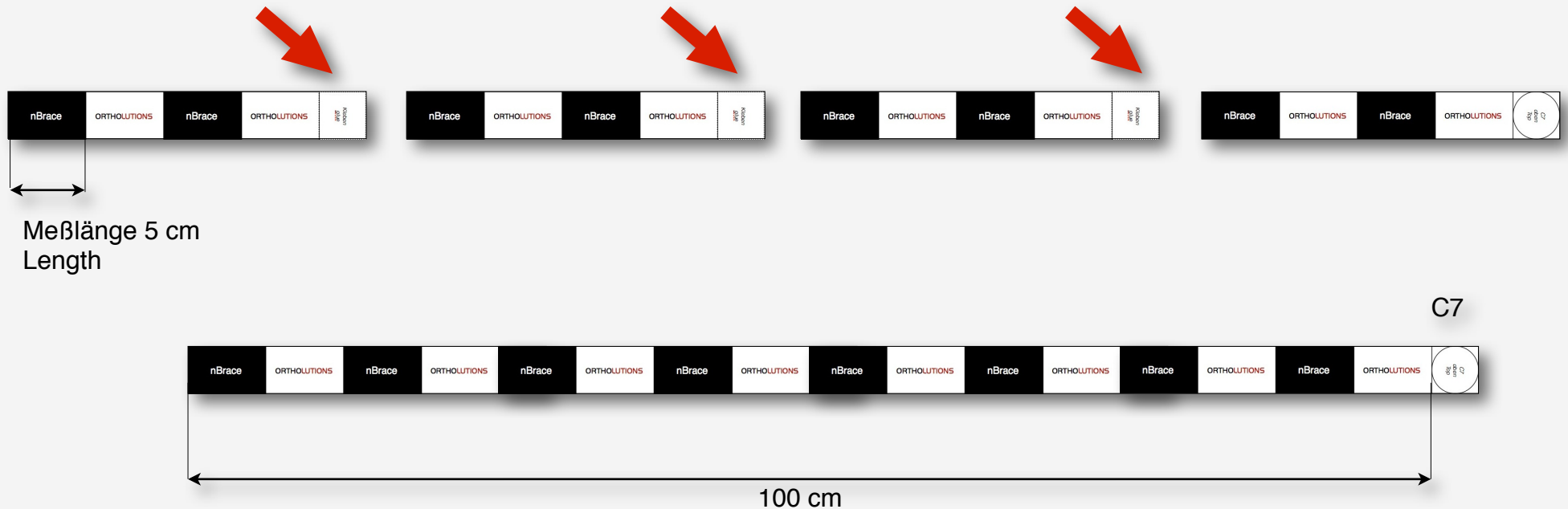



nBrace	ORTHOLUTIONS	nBrace	ORTHOLUTIONS	Kleben glue
--------	--------------	--------	--------------	----------------

nBrace	ORTHOLUTIONS	nBrace	ORTHOLUTIONS	Kleben glue
--------	--------------	--------	--------------	----------------

nBrace	ORTHOLUTIONS	nBrace	ORTHOLUTIONS	Kleben glue
--------	--------------	--------	--------------	----------------

nBrace	ORTHOLUTIONS	nBrace	ORTHOLUTIONS	Kleben glue
--------	--------------	--------	--------------	----------------

nBrace	ORTHOLUTIONS	nBrace	ORTHOLUTIONS	C7 oben Top
--------	--------------	--------	--------------	-------------------